

# GEDIS®

## GEBRUIKSAANWIJZING

- 1.** Bewaar **horizontaal** de GEDIS® op een temperatuur van 17° C (+ of - 2°C).
- 2.** Reinig zorgvuldig de vulva.
- 3.** Homogeniseer het sperma door **3 maal zachtjes met de kop van de GEDIS® in de holte van de hand te tikken. Halve toer draaien en opnieuw tikken.**
- 4.** Voor het openscheuren van het sanitair omhulsel, volstaat het nu om de dop af te breken door met de duim aan de bovenzijde te duwen.
- 5.** Vanaf de gemaakte opening het sanitair omhulsel losscheuren door het naar beneden te trekken.
- 6.** Doe glijmiddel aan de kop en het gedeelte erachter.
- 7.** Bevestig het verlengstuk, breng de GEDIS® in de zeug terwijl het sanitair omhulsel achterwege wordt gehouden.  
Laat de zeug zichzelf insemineren.  
Na een 10-tal minuten, verwijder de lege GEDIS® a.d.h. van het omhulsel.

